

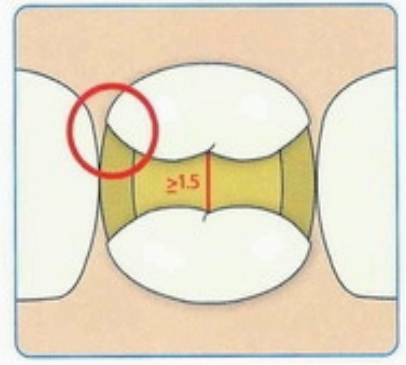
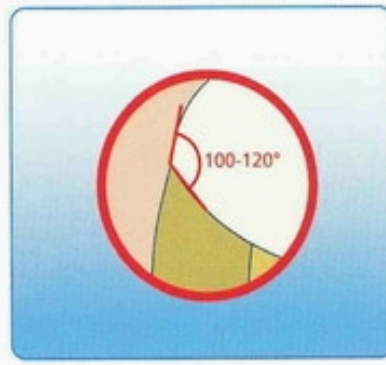
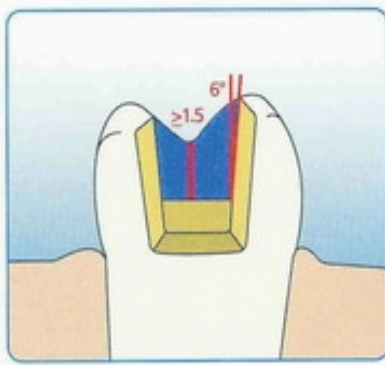
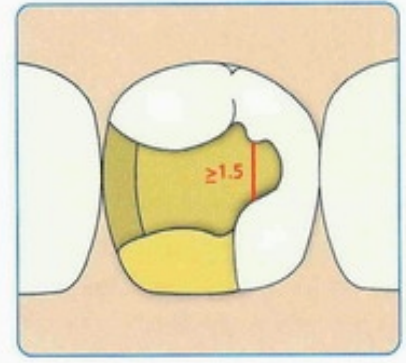





inlay

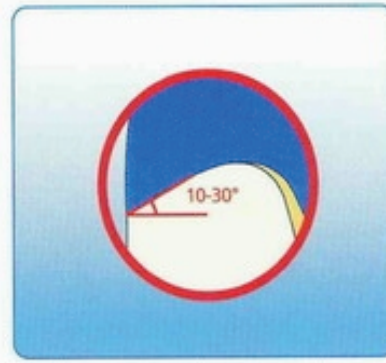

onlay

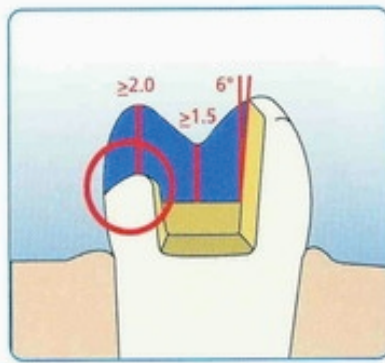

volledige kroon

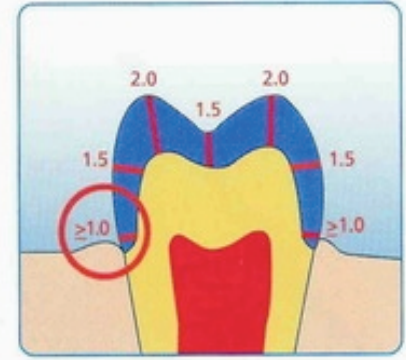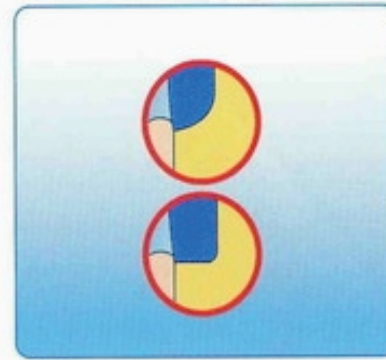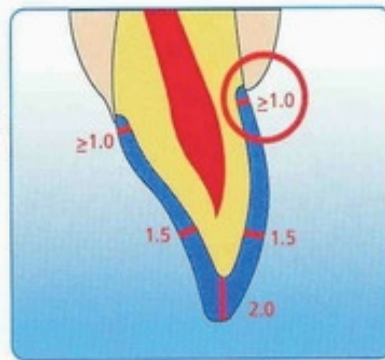

Voor zirconiumoxide kronen en bruggen dienen de preparaties conisch uitgevoerd te worden.

Voor een optimale outline heeft een chamfer preparatie de voorkeur.

Ook is het belangrijk om occlusaal geen scherpe hoeken te prepareren omdat Cad-Cam systemen geen scherpe hoeken kunnen frezen.

Deze scherpe hoeken worden anders uitgeblokt door de machine waardoor er occlusaal minder ruimte ontstaat.

Voor een mooi occlusaal resultaat moet er minimaal 1,5 mm ruimte zijn. Laatste maar niet onbelangrijk punt is dat van occlusaal gezien de outline rondom te zien moet zijn.